

PHILIPS

InnoSpire Go

Tragbarer
Mesh-Vernebler

Aufatmen bei Klein und Groß

Der einfach zu bedienende und nahezu geräuschlose InnoSpire Go wurde speziell dafür entwickelt, die Behandlungsdauer zu verkürzen, sodass Ihre Patienten wieder mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben.

Der InnoSpire Go verwendet die bewährte und klinisch erprobte Vibrating-Mesh-Technologie (Schwingmembran), die weltweit in Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Für die Behandlung mit allen gängigen inhalativen Medikamenten kann der Vernebler verwendet werden.



So einfach wie Zähneputzen



1. Vorbereiten

Die grüne Abdeckung öffnen, das Medikament einfüllen und schon ist der InnoSpire Go einsatzbereit.



2. Anwenden

Die Einschalttaste drücken, um den InnoSpire Go zu starten.



3. Reinigen

Das Mundstück abnehmen und kurz mit warmem, fließendem Wasser abspülen.

Der InnoSpire Go ist ganz einfach zu bedienen und unterstützt Ihre Patienten so dabei, die Behandlung richtig durchzuführen.



Behandlung in 4 Min.*

Eine wirksame Aerosoltherapie mit akustischen und visuellen Signalen, die den Abschluss der Behandlung anzeigen – bevor sich das Gerät selbst ausschaltet.



Nahezu geräuschlos

Ein kleiner, tragbarer und diskreter Vernebler, den Ihre Patienten überall und jederzeit für ihre Behandlung einsetzen können.



Integrierter Akku

Wiederaufladbarer, langlebiger, integrierter Akku, mit dem bis zu 30 Behandlungen möglich sind, bevor dieser aufgeladen werden muss.



Nur zwei Einzelteile

Dank des aufsetzbaren Mundstücks lässt sich der InnoSpire Go einfach verwenden, reinigen und pflegen, wodurch die Therapietreue verbessert wird.**

InnoSpire Go Aerosoleigenschaften

	Salbutamol 2,5 ml	Ipratropium- bromid 2 ml	Budesonid 2 ml
Durchschnittlicher Teilchendurchmesser (MMAD) in µm	3,99	3,93	4,84
Feinpartikelfraktion (FPF) in %, Partikel < 5 µm	64,4 %	65,3 %	52,1 %
Behandlungsdauer (Min)	4,18	3,44	3,34
Restvolumen in ml	0,3	0,2	0,3



Produktspezifikationen

Akku	Lithium-Ionen
Abmessungen	7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
Gewicht	111 g
Gewährleistung	Handgerät: 2 Jahre Mundstück: 1 Jahr

* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.

** Für Kinder, die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, ist außerdem eine Maske im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen – www.philips.de/respironics



© 2017 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen sind vorbehalten.
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V.
oder ihrer jeweiligen Inhaber.



ML 6/26/17 PN483911
www.philips.de/respironics