

Reinigungs- und Desinfektionsanleitung

MRT

Hinweis: Bevor Sie die Geräte reinigen und desinfizieren, lesen Sie bitte den Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“ in der Philips Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um die Sicherheit und Bedienbarkeit zu gewährleisten.

Reinigungsanleitung

1. Verwenden Sie ein weiches Tuch, das in **neutrale Seife oder neutrales Reinigungsmittel** getaucht wird (es wird empfohlen, flüssige Seife statt Desinfektionsmittel zu verwenden) und wischen Sie die Oberfläche des Gerätes ab, bis die sichtbaren Verunreinigungen entfernt sind.
2. Verwenden Sie ein **weiches Tuch, getränkt mit klarem Wasser**, um die restlichen Partikel und Rückstände zu entfernen.
3. Verwenden Sie ein **trockenes und weiches Tuch**, um die Oberfläche des Gerätes zu trocknen.
4. Bei Positionierungsgurten wird die Reinigung mit **neutraler Seife oder neutralem Reinigungsmittel** empfohlen (in der Waschmaschine bei **40 °C** oder weniger waschbar). Vor der Verwendung trocknen lassen.
5. Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Steckers der digitalen Spule Alkohol, saubere Tücher und Wattestäbchen (im Lieferumfang des Systems enthalten).
6. Gebrauchte Reinigungsmaterialien sollten gemäß den Vorschriften zur Entsorgung von Schadstoffen entsorgt werden.
7. Wenn Sie beschädigte Matten, Sandsäcke oder Kopfhörer-Schaumstoffpads entdecken, ersetzen Sie diese bitte umgehend und verwenden Sie sie nicht weiter.
8. Sollten Sie Schäden an Spulen oder Kabeln feststellen, verwenden Sie diese bitte nicht mehr.

Die Reinigung und Desinfektion Ihres MRT-Systems muss allen geltenden Gesetzen und Vorschriften des Hoheitsgebiets entsprechen, in dem sich Ihr System befindet.

Desinfektionsanleitung

Empfohlenes Desinfektionsmittel:

Isopropanol 70%; Ethanol 70%; Chlorhexidin 0,5% in 70% Ethanol

1. Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes gemäß der „MRT-Reinigungsanleitung“.
2. Verwenden Sie ein **weiches, mit Desinfektionsmittel getränktes Tuch** und wischen Sie die Oberfläche des Gerätes ab.
3. Wenn Sie **Ethanol** verwenden, lassen Sie die Oberfläche an der Luft trocknen.
4. Wenn Sie ein **chlorhaltiges** Desinfektionsmittel verwenden, benutzen Sie nach dem Desinfizieren ein **mit klarem Wasser getränktes, weiches Tuch, um das restliche Chlor-Desinfektionsmittel auf der Oberfläche des Gerätes zu entfernen**. Lassen Sie die Oberfläche anschließend an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
5. **Verwenden Sie keinesfalls entzündliche oder explosionsfähige Sprays**. Die Dämpfe können Feuer, tödliche Verletzungen oder andere schwere Personen- und/oder Geräteschäden verursachen.
6. **Es wird nicht empfohlen, die Räume mit medizinischen Geräten durch Sprühdeseinfektion zu desinfizieren**, da die Dämpfe in die Geräte eindringen und Kurzschlüsse oder Korrosion verursachen können.
7. Gebrauchte Reinigungsmaterialien sollten gemäß den Vorschriften zur Entsorgung von Schadstoffen entsorgt werden.
8. Wenn Sie beschädigte Matten, Sandsäcke oder Kopfhörer-Schaumstoffpads entdecken, ersetzen Sie diese bitte umgehend und verwenden Sie sie nicht weiter.
9. Sollten Sie Schäden an Spulen oder Kabeln feststellen, verwenden Sie diese bitte nicht mehr.