



2 Menüzugriff

Zugang zum vollständigen Menü und zum Ändern von Einstellungen

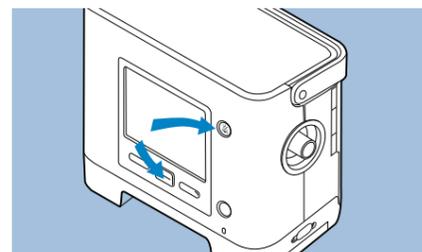


Ist der Menüzugriff gesperrt und erscheint nach Einschalten des Gerätes das nicht, so gelangen Sie wie folgt in das Einstellmenü: Drücken Sie einige Sekunden lang und .

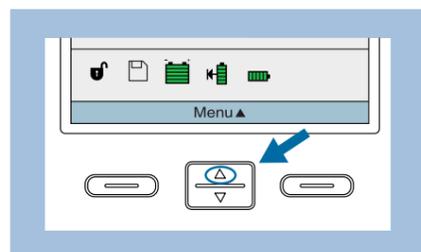


Wenn nach dem Drücken des Ein-/Aus-Schalters auf dem Bildschirm zu sehen ist, haben Sie bereits vollständigen Menüzugriff. Drücken Sie um in das Menü zu gelangen.

Zugang zu allen Einstellungen beibehalten

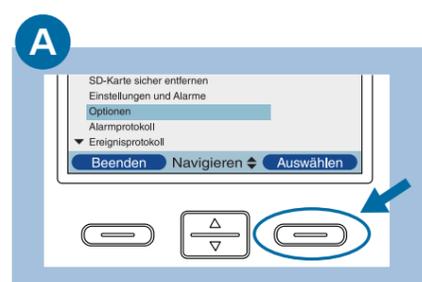


Navigieren Sie zum Menüpunkt „Optionen“ und drücken Sie **Auswählen**.

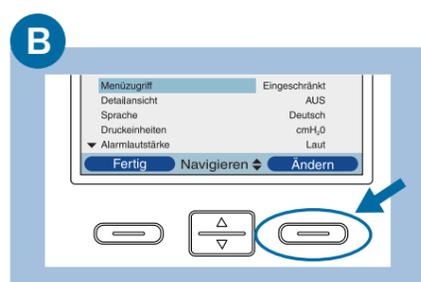

Drücken Sie **Ändern**, um in den Menüzugriff zu gelangen.



Wechseln Sie mit zur Option „Vollständig“ und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

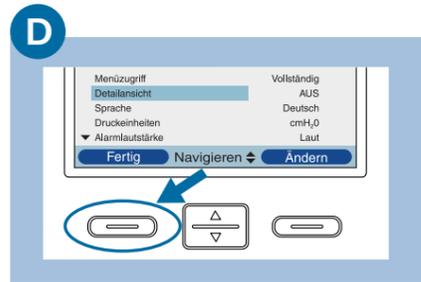

Drücken Sie **Fertig** und **Beenden**. Das Gerät schaltet sich ab. Über die Ein-/Aus-Taste gelangen Sie in das Beatmungsmenü.



© 2015 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, Geräte jederzeit technisch zu verändern und/oder die Herstellung eines Produkts ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen, und haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch dieses Dokuments entstehen.

Broudy AM 5/22/15 MCI 4106686 PN 1057962

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 US

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50


www.philips.de/respironics



Kurzanleitung

- 1 Übersicht
- 2 Menüzugriff
- 3 Anschluss Schlauchsystem
- 4 Einstellen der Beatmung

1 Übersicht

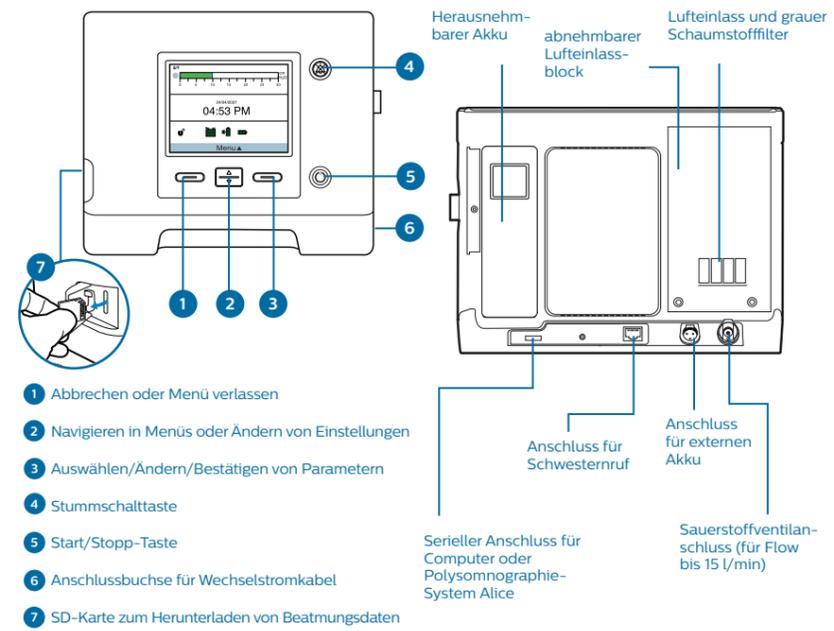

Symbole und Zeichenerklärung

- Modus mit vollständigem Menüzugriff
- SD-Karte im Beatmungsgerät
- Stummschalttaste aktiv
- Rampe aktiv
- Statusanzeige für herausnehmbaren Akku
- Statusanzeige für internen Akku
- Statusanzeige für externen Akku
- Akku wird geladen.








3 Anschluss Schlauchsystem

Vor der Inbetriebnahme des Trilogy100 müssen Sie das Schlauchsystem konfigurieren.

Konfiguration mit aktivem Ausatemventil








Konfiguration mit passivem Ausatemventil

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen

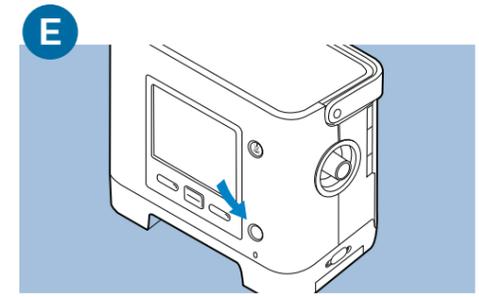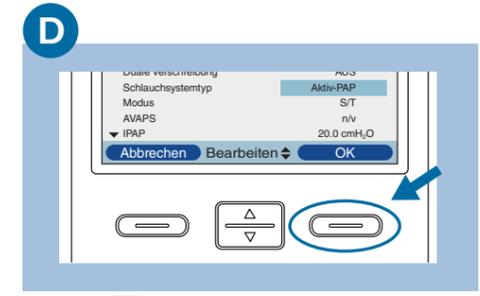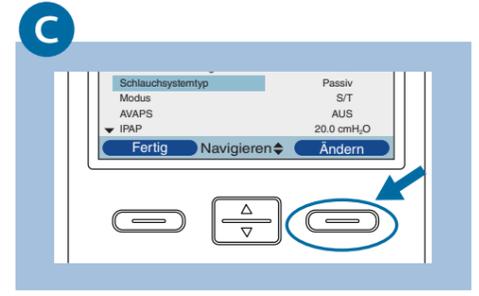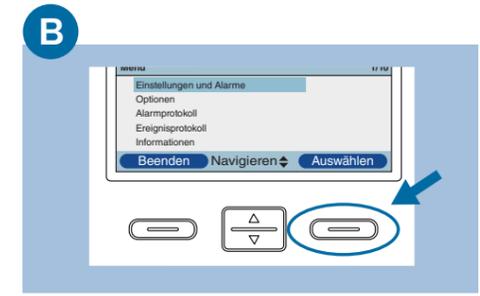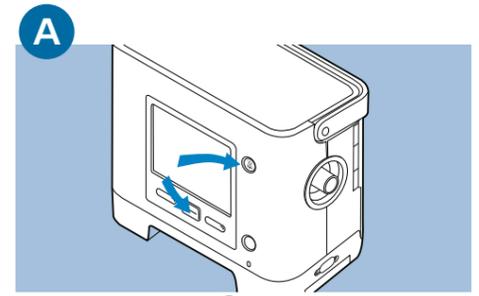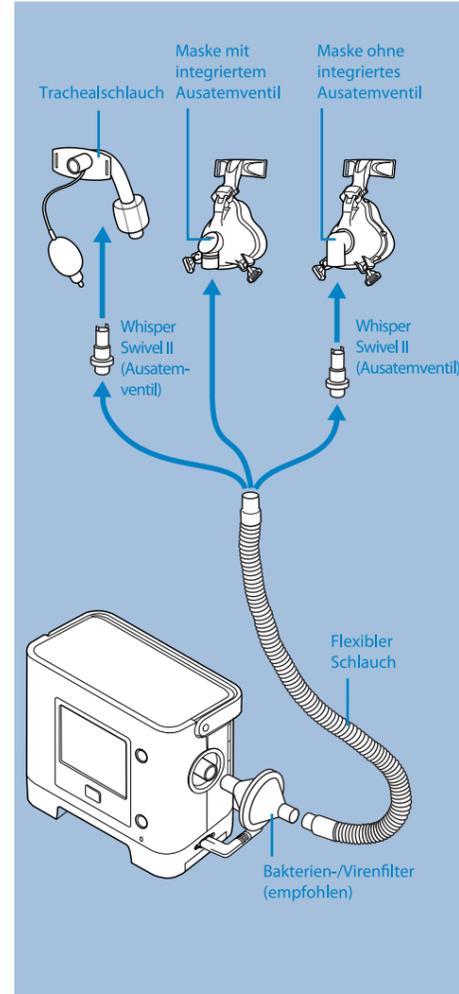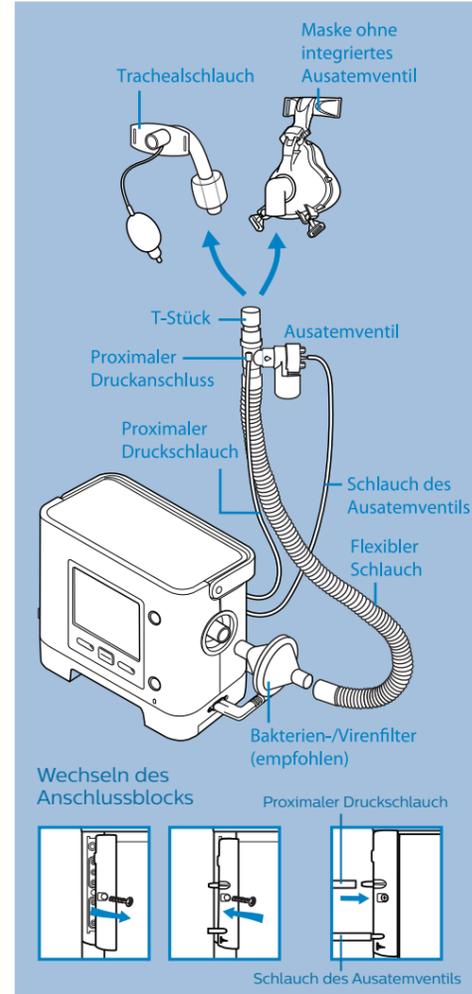

Überprüfen Sie, ob das Schlauchsystem richtig konfiguriert wurde.

4 Einstellen der Beatmung

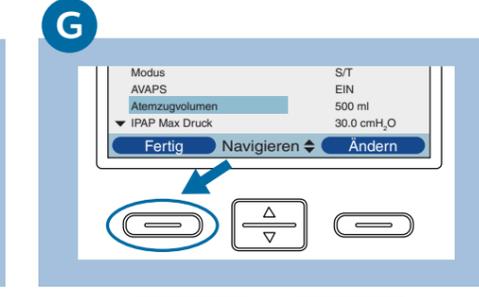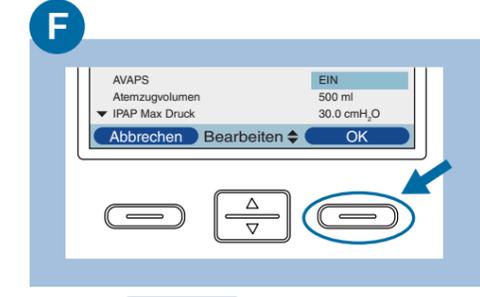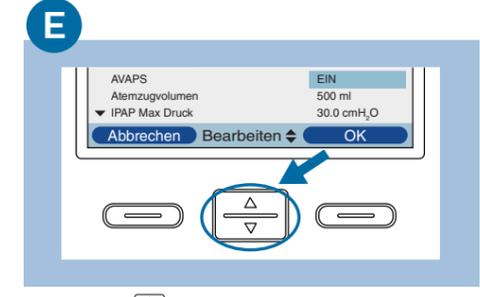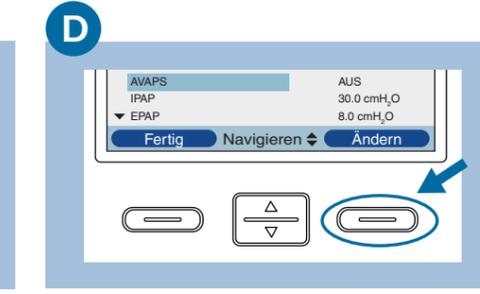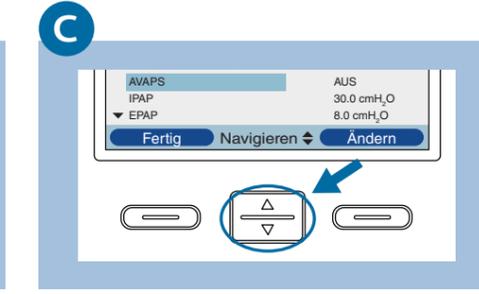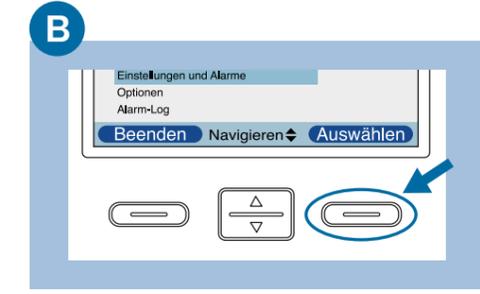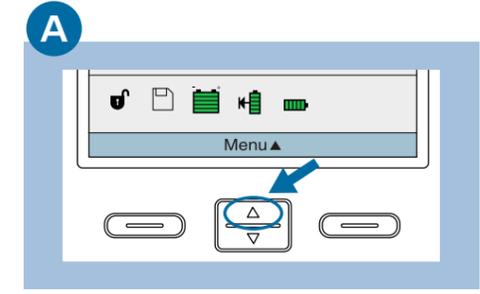

Duale Verschreibung

